



Tisztelt látogató, kedves szülő!

Köszönjük, hogy megtisztel figyelmével, és megtekinti az ÁlomVirág babalégzésfigyelő készülékünk rövid ismertetőjét, mely orvosok által tesztelt és tanácsolt, a Babára és Önre ártalmatlan anyagok felhasználásával előállított termék.

Az ÁlomVirág baba-légzésfigyelő készülék a



KERMI ajánlásával és engedélyével készült.



Legfontosabb jellemzők

- egyszerű üzembehelyezés, kezelés és karbantartás
- nem érintkezik a Babával, nem bocsájt ki semmilyen sugárzást
- elektronikája korszerű, kifejezetten a baba légzését figyeli, melynek kimaradásakor jól hallható riasztójelzést ad
- csekély fogyasztása miatt hosszú az ajánlott elemek (VARTA LR6 AA Alkáli) várható élettartama
- az elemek kimerülésekor figyelmeztető hang- és fényjelzést ad
- gyakorló édesanyák véleményének segítségével kialakított működtetés
- megfelelő, rugalmas szervízháttér és szaktanácsadás, szolid ár
- orvosok és védőnők által tesztelt és javasolt készülék, a Baba 0-12 hónapos korában előforduló, *esetenként akár végzetes következményekkel járó légzéskimaradás* észlelésére és a szülő (felügyelő személy) riasztására

A készülék értékesítése mellett próbálunk minél több - a témával kapcsolatos - hasznos információt eljuttatni a szülőkhöz, vásárlókhöz, ezért minden egyes dobozban megtalálható egy *információs film*.



A film orvosi támogatással elkészített anyag, mely megtekintése után a szülő segítséget tud nyújtani a Babának, a szakember megérkezéséig. Emellett felhívja a figyelmet a kockázati tényezőkre, és hasznos tanácsokat ad a mindennapi babagondozáshoz.



Az ÁlomVirág felépítése, tartozékai

A készülék egy piros, virág alakú, mágneses hátlappal rendelkező kijelző egységből és három darab zöld, egyenként 210mm x 300mm-es érzékelő párnából áll.

A kijelzőt és az érzékelő párnákat 3 méter hosszú, csatlakozóval ellátott vezeték köti össze.

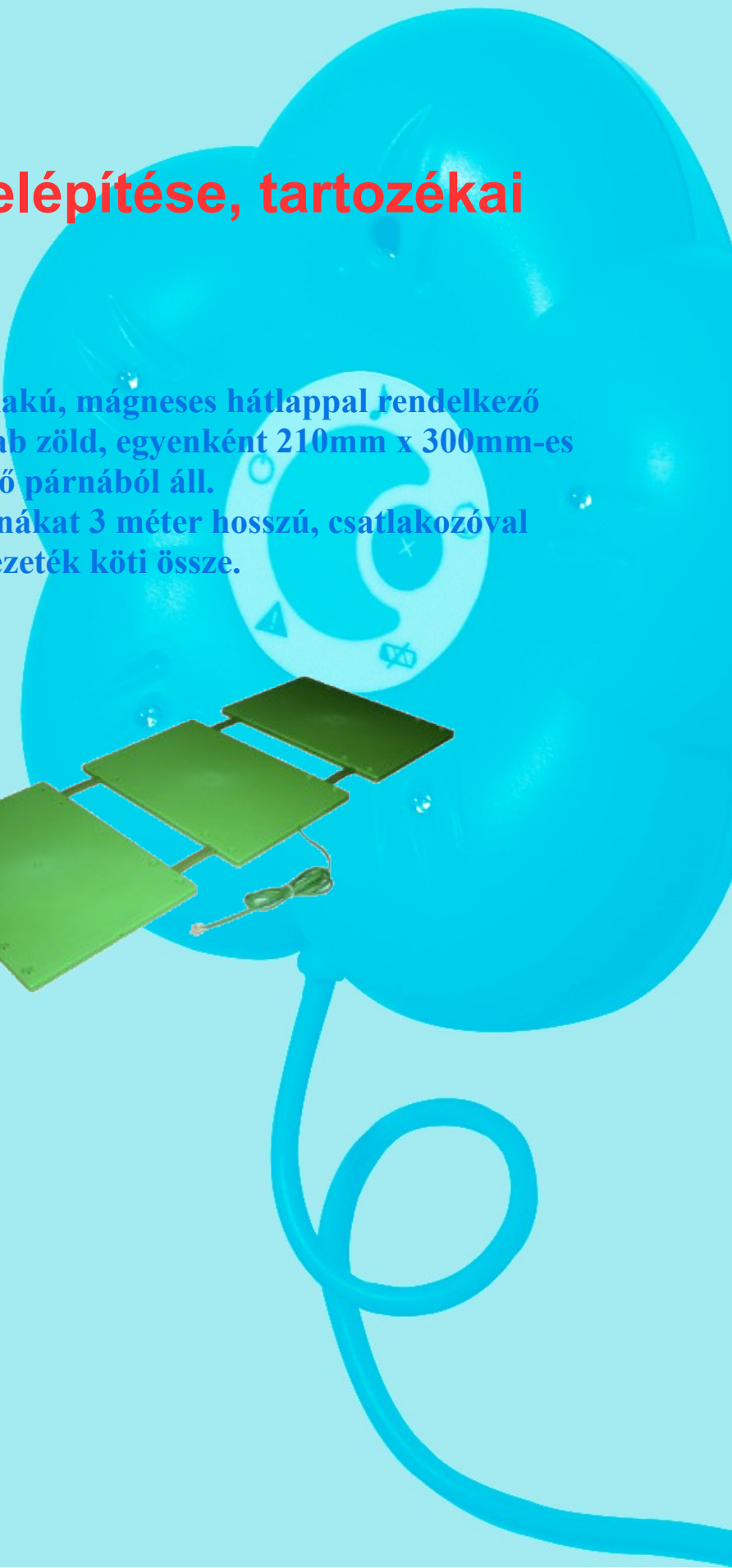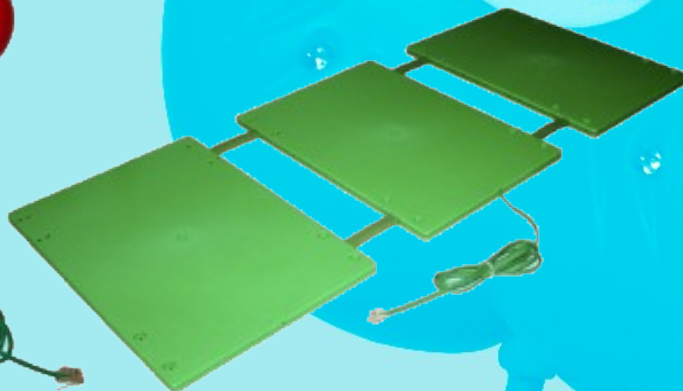

Az ÁlomVirág felépítése, tartozékai

A készüléket 2 darab 1,5V-os (LR6) AA alkáli ceruzaelem működteti. A mellékelt mágneses öntapadó (sárga színű, ÁlomVirág felirattal) a készülék kijelzőjének egyszerű rögzítését szolgálja.




BEKAPCSOLÁS 




hangszóró 


**bekapcsolt
állapot
jelzése,
LED*** 

**riasztás,
hibajelzés,
LED*** 



KIKAPCSOLÁS 

**lélegzetvétel
jelzése, LED*** 

**elem lemerülés
jelzése, LED*** 




Előkészületek



A zöld érzékelő párnákat a baba kiságyának szivacsá (matrac) alá helyezze el. A párnák a felettük lévő felületen érzékelnek. Az ÁlomVirág használható normál matrac (szivacs) és kókusz matrac alatt egyaránt. A vásárolható matracok vastagsága (kb. 5 - 12 cm) megfelel a készülék tökéletes működéséhez.

Ezután válasszon egy helyet a kiságyon, vagy a mellette lévő falon, úgy, hogy az ÁlomVirág jelzései jól láthatóak, hallhatóak legyenek.

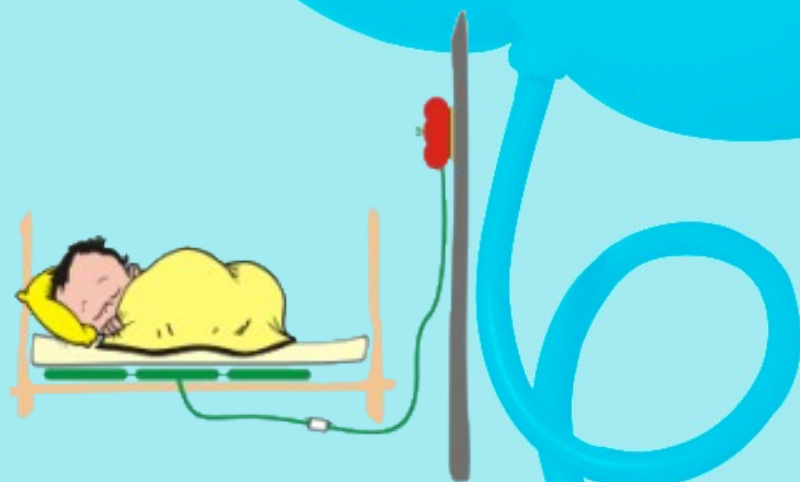A sárga mágneses lapot helyezze el a kiválasztott felületre. Az elemek behelyezése után a készüléket és a párnát csatlakoztassa össze, és helyezze üzembe.



Üzembehelyezés, működtetés

A kijelző egység 2 darab nyomógommbal (bekapcsolás: , kikapcsolás: ) rendelkezik.

A bekapcsoláshoz a  gombot nyomja meg. A helyes bekapcsolást fény- és hangteszt jelzi.

Fényteszt: a kijelzőn minden LED kétszer felvillan.

Hangteszt: egyidejűleg két sípolás.

Bekapcsolt állapotban a bekapcsolt állapotot jelző **zöld LED** folyamatosan világít (riasztás esetén is), illetve a lélegzetvételt jelző **zöld LED** villog a baba légzésének megfelelően.

Légzéskimaradás esetén a kijelző egység 15 másodperc letelte után 1 sípolással, és a **piros LED** egyszeri felvillanásával jelez: előriasztás! Újabb 5 másodperc (összesen 20 másodperc) letelte után fényjelzéssel (a **piros LED** villogása) és egyedülálló (Morze S.O.S) tartós hangjelzéssel riaszt, lehetőséget nyújtva életmentő beavatkozásra.

Üzembehelyezés, működtetés

Kikapcsoláshoz a **gombot** nyomja meg. Ebben az esetben 1 sípolás hallható, és a kijelzőn minden LED felvillan egyszer, majd fényjelzésük megszűnik.

A rossz csatlakozást **AZONNAL** jelzi a készülék, a **piros LED** és a lélegzetvételt jelző **zöld LED** villogása és szaggatott zümmögő hangjelzés kíséretében.

Üzembehelyezés után a készülék érzékeli, és folyamatosan felügyeli a baba légzését.

Alacsony tápfeszültség esetén a lemerült elemet jelző **sárga LED** szaggatott zümmögő hangjelzés kíséretében villog együtt a riasztást jelző **piros LED**-del.

Ebben az esetben feltétlenül ki kell cserélni az elemeket!


FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Az ÁlomVirág baba légzésfigyelő készülék - megfelelő üzembehelyezés és használat esetén - jelzi a légzés kimaradását, de életmentő beavatkozásra NEM alkalmas.

A szülők nyugalmának biztosítása érdekében előállított termék, mely hathatós segítséget nyújt a Baba légzésének figyelésében, de semmiképpen NEM helyettesíti a szülői gondoskodást, a Baba szülői felügyeletét és a szülői intézkedést, segítségnyújtást

Az ÁlomVirág baba légzésfigyelő használatával kapcsolatban kérje ki gyermeke orvosának, védőnőjének szaktanácsait!

Műszaki adatok



Gyermek súlya:	2.500g – 10.000g
Készülék anyaga:	ABS
Vezeték anyaga:	PVC
Tápfeszültség:	3V DC
Elem típusa:	AA LR6 (kizárólag alkáli)
Elem várható élettartama:	1200 üzemóra
Üzemeltetési hőmérséklet:	10°C-30°C
Tárolási hőmérséklet:	0°C-40°C
Saját tömeg (Brt.):	1500g
Saját tömeg (Net.):	1300g